

Septoject

Sterilní silikonizované dentální jehly z
nerezové oceli se zkoseným značením

(CE) : 12/1998
Rév. : 12/2013



SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
France
Tél.: 33(0)1 49 76 70 00

05/15

S 05 98 064 12 00



STERILE R



Septoject XL

Sterilní silikonizované dentální jehly z nerezové
oceli se zkoseným značením - jehly s větším
vnitřním průměrem

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

- Plombu záruky sterility porušte až těsně před použitím otočením dvou částí ochranného pouzdra v opačných směrech.
- Našroubujte jehlu se závitem na kužel stříkačky se závitem.

- Odstraňte plastové víčko těsně před podáním injekce. Může se opětovně použít na vytazení jehly ze stříkačky, aby se předešlo riziku píchnutí jehlou.

- Zlikvidujte použitou jehlu do nádoby odolné proti propíchnutí v souladu se všemi platnými předpisy týkajícími se zdravotnického odpadu.

VAROVÁNÍ

- Víčko na jehlu nikdy znovu nenasazujte ručně. Používejte pouze schválené postupy na opětovné nasazení víčka na jehlu. Opětovné nasazování víčka na jehlu ručně nebo opětovné nasazování víčka na ohnutou nebo zlomenou jehlu může způsobit nežádoucí píchnutí jehlou.
- Jehly neohýbejte, nelámejte ani jinak nenamáhejte, protože byste mohli způsobit vážné zranění sobě a / nebo pacientovi.
- Nevkládejte jehlu na kužel během podávání injekce, protože jehly by se mohly zlomit a zaseknout v tkáni pacienta a působit vážné trvalé zranění. Nepoužívejte krátké jehly (< 30 mm), když je očekávaná hloubka v měkkém tkáni téměř stejná jako délka jehly.
- Během podávání injekce se vyhýbejte příliš velkému tlaku a nadměrným pohybem s jehlou, protože to může způsobit zlomení jehly, což může vést k vážnému zranění vás a / nebo pacienta.
- Budte zvlášť opatrní při změně polohy jehly u pacienta, který má strach.
- Pro Septoject XL: vyhýbejte se příliš rychlému podání injekce a / nebo nadměrnému tlaku. Mohlo by to vést ke zvýšené bolesti pacienta během podávání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Uchovávejte v ochranném obalu až do použití.
- Přečtěte si návod k použití přiložený k injekčnímu zařízení.
- Pokud je plomba poškozená, jehla NENÍ STERILNÍ a NESMÍ SE POUŽÍT.
- Pouze na jedno použití: Toto injekční zařízení je určeno pouze pro jednoho pacienta. Jakékoli opětovné použití vystavuje ostatní pacienty a uživatele závažným rizikům včetně infekce a traumatu, protože jehla již není sterilní a je náchylnější na zlomení.
- Pokud se vyžaduje několik injekcí, vyměňte jehlu pro každou náplň, aby minimalizovalo riziko poškození hrotu jehly.
1 pacient / 1 náplň / 1 jehla
- Pokyny pro první uživatele jehly Septoject XL: Protože XL jehly mají větší lumen (otvor) než ostatní jehly, před podáním injekce je nutné stabilizovat měkké tkáně ke snížení rizika odklonu jehly.

Balení

100 dvoubodových jednorázových neresterilizovatelných dentálních jehel.

Pouze pro proefsionální použití.

SEPTOJECT

Tailles d'aiguilles disponibles / Needle Sizes available	En mm (S.I.) / In mm (I.S.)	Diamètre en Gauge / Diameter in Gauge	Type d'injection / Type of injection
Extra-courte / Extrashort	0.3 x 08 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary
Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 10 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary
Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 12 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary
Courte / Short	0.3 x 16 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.3 x 21 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.3 x 23 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.3 x 25 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapical
Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 08 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal
Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 12 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal
Courte / Short	0.4 x 16 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.4 x 21 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.4 x 23 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.4 x 25 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapical
Longue / Long	0.4 x 35 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block
Longue / Long	0.4 x 42 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block
Extra-Courte / Extrashort	0.5 x 08 mm	25 Ga	Intraseptale / Intraseptal
Courte / Short	0.5 x 25 mm	25 Ga	Para-apicale / Periapical
Longue / Long	0.5 x 35 mm	25 Ga	Tronculaire / Nerve block
Longue / Long	0.5 x 42 mm	25 Ga	Tronculaire / Nerve block

SEPTOJECT XL

Tailles d'aiguilles disponibles / Needle Sizes available	En mm (S.I.) / In mm (I.S.)	Diamètre en Gauge / Diameter in Gauge	Type d'injection / Type of injection
Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 10 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary
Extra-Courte / Extrashort	0.3 x 12 mm	30 Ga	Intraligamentaire / Intraligamentary
Courte / Short	0.3 x 16 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.3 x 21 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.3 x 23 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.3 x 25 mm	30 Ga	Para-apicale / Periapical
Extra-Courte / Extrashort	0.4 x 08 mm	27 Ga	Intraseptale / Intraseptal
Courte / Short	0.4 x 16 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.4 x 21 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapical
Courte / Short	0.4 x 25 mm	27 Ga	Para-apicale / Periapical
Longue / Long	0.4 x 35 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block
Longue / Long	0.4 x 42 mm	27 Ga	Tronculaire / Nerve block