

## Návod k použití

**SILON MONOFILAMENT****Sterilní chirurgické nevstřebatelné polyamidové monofilní vlákno****Popis výrobku:**

Silon monofil je syntetické hlazené monofilní polyamidové vlákno ke zdravotnickým účelům. Pro lepší viditelnost v operačním poli se vlákna barví stálým, nedráždivým barvivem schváleným pro použití pro zdravotnické materiály.

Maximální protažení vlákna činí 40 %. Silon monofil ztrácí mechanickou pevnost přibližně po 1 roce v tkáni.

**Indikace:**

Silon monofil je vhodný pro použití zejména v plastické chirurgii a ke stehům kůže ve všech operačních oborech.

**Reakce v tkáni:**

Nepatrná zánětlivá reakce na cizí těleso.

**Kontraindikace:**

Nepoužívat při stehu tkáni, které vyžadují dlouhodobou mechanickou podporu.

**Upozornění:**

Výrobek nelze použít opakovaně, nebyl by sterilní.

**Zásady manipulace:**

Výrobek je určen k jednorázovému použití!

Nepoužívejte šicí materiály s poškozeným obalem!

Před použitím zkontrolujte dobu expirace vyznačenou na obalu!

Nepoužívejte výrobek po ukončení doby expirace!

Neresterilizujte!

Se šicím materiálem mohou zacházet pouze osoby proškolené (lékaři, zdravotní sestry).

**Postup při otvírání sáčku se sterilním šicím materiálem:** Sáček vyjměte z krabičky nesterilně, uchopte do obou rukou a tahem rukou od sebe sáček otevřete. Dále již pracujte sterilně! Sáček s návlekiem nemačkejte.

U návleků v atraumatických jehlách: po otevření sáčku vyjměte a otevřete cívku s návlekiem (odtržením horní perforované části papírové cívky). Jehelcem uchopte jehlu v její části od 1/3 do 1/2 vzdálenosti mezi koncem a špičkou a tahem směrem ze sáčku návlek snadno vyjměte. Při vyjímání návleku ze sáčku dbejte na zachování sterility. Při vyjímání atraumatického návleku ze sáčku vždy použijte jehelec.

Výrobek je sterilní, nit vytažená mimo obal je určena k okamžitému použití.

Zbýlý použitý materiál likvidujte do předem určených nádob – prevence poranění zdravotnického personálu.

Při správném a sterilním zacházení s výrobkem výrobce zaručuje absolutní kvalitu výrobku.

**Sterilizace:**

Výrobek je sterilizován ethylenoxidem nebo radiačně gamma paprsky.

**Skladování:**

Výrobky je nutno skladovat v původních obalech, v čistých suchých místnostech, při teplotě 10–25° C, chráněné před světlem a před vlivem jakýchkoliv výparů.

**Výklad symbolů na obalu:**

Nepoužívat znovu / pro jednorázové použití

Použitelné do

Číslo šarže

Sterilní – sterilizováno ethylenoxidem

Sterilní – sterilizováno ozářením

Katalogové číslo

Pozor, viz návod k použití

CE značka a identifikační číslo zkušební. Výrobek odpovídá požadavkům Směrnice Evropské rady 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

**Výrobce:**

CHIRANA T. Injecta, s. r. o.

Komořanská 2148, 143 00 Praha 4

Česká republika

tel: ++420-2-417 73 238, 417 73 765,

++420-2-417 68 407-8

fax: ++420-2-44 40 09 10

e-mail: [sales@t-injecta.cz](mailto:sales@t-injecta.cz)



STATUS 09/2014