

AIR-FLOW® PLUS



Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte doporučení uvedená v pokynech, které jsou dodávány s originálním přístrojem, a řiďte se jimi. Věnujte prosím pozornost zvláště pokynům týkajícím se bezpečnosti.

Popis produktu

AIR-FLOW® PLUS (profylaktický prášek) se používá výhradně pro subgingivální a supragingivální ošetření.

Uživatelé modelů AIR-FLOW® Master a AIR-FLOW® Master Piezon: tento prášek není kompatibilní s prachovými komorami AIR-FLOW® ani PERIO-FLOW. Smí se používat pouze s prachovými komorami AIR-FLOW® PERIO+PLUS.

Tento prášek se používá ve stomatologii společně se zařízeními pracujícími na principu aeroabrazie.

Oblast použití

Tento prášek odstraňuje zubní plak a doporučuje se na následující postupy čištění:

SUBGINGIVÁLNÍ použití:

- Odstraňování periodentálního biofilmu,
- Údržba při periodentální léčbě po dokončení počátečního ošetření,
- Čištění implantátu.

SUPRAGINGIVÁLNÍ použití:

- Odstraňování supragingiválního biofilmu,
- Pravidelné profylaktické čištění a návštěvy,
- Odstraňování skvrn kolem sulku a v citlivých oblastech,
- Leštění zubů.

Kontraindikace

 Pacienti trpící infekcí horních cest dýchacích chronickou bronchitidou nebo astmatem se za žádných okolností nesmí ošetřovat přístrojem pracujícím na principu aeroabrazie. Proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací potíže.

 Osoby s predispozicí mohou být citlivé na chlorhexidin. Pokud zaznamenáte alergické reakce, přestaňte výrobek používat a zcela odstraňte prášek z úst.

 Léčba hlubokých periodontálních váčků může způsobit bakteriémii. Při léčbě rizikových pacientů postupujte opatrně (endokarditida, těhotenství, kojení, nakažlivá choroba, imunodeficience (neutropenie, angranulocytóza, diabetes, hemofilie), pacienti podstupující léčbu (radioterapie, chemoterapie, antibiotika).

 Proud prášku nesměrujte přímo na výplně, korunky nebo můstky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

Doporučení pro ošetření

 Pacient i uživatel musí být vybaveni ochranou očí.

 Osoba provádějící ošetření musí být vybavena maskou a rukavicemi.

 Používejte vysokorychlostní odsávačku stomatologické soupravy.

 Při použití prášku PLUS se zařízením AIR-FLOW® Master a AIR-FLOW® Master Piezon používejte jen prachovou komoru „AIR-FLOW® PERIO+PLUS“.

 Tento prášek nedokáže odstranit zubní kámen.

 K ochraně rtů pacienta před ošetřením použijte přípravek Vaseline®.

 Po použití umyjte pacientovi obličej (např. vlhčenými ubrousky).

Obecné informace

- Nepřekračujte maximální množství prášku, které je označeno na nádobě.
- Prášek nepěchujte
- Prášek neobsahuje cukr.

Uchování a doba skladovatelnosti

- Prášek by neměl být uchováván v blízkosti zdrojů tepla.
- Skladovací podmínky: -10 °C až 25°C, relativní vlhkost 10 % až 90 %.
- Po uplynutí doby expirace prášek nepoužívejte.
- Prášek nesmí být uskladněn v zásobníku přístroje déle než týden.

Další nabídka:

- AIR-FLOW® CLASSIC s příchutěmi: citron, mentol, černý rybíz, třešně, tropické ovoce a neutrální příchut' (pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® SOFT (neobsahující sůl pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® PERIO (neobsahující sůl pro subgingivální ošetření).

Složení prášku:

- Erythritol
- Amorfní oxid křemičitý
- Chlorhexidin



Upozorňujeme, že anglický text těchto pokynů je znění, z něhož byly pořízeny všechny překlady. V případě jakékoliv nesrovnalosti je závazná anglická verze textu.

EMS Electro Medical Systems SA

Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon / Switzerland
Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
e-mail: welcome@ems-ch.com
www.ems-swissquality.ch

EMS worldwide offices

EMS Canada Inc.
5524 St. Patrick St., Suite 312
Montréal, QC H4E 1A8 Canada
Tel. +1 514 736 5066
Fax. +1 514 736 5065
e-mail: info@ems-canada.ca