

AIR-FLOW® PERIO



Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete doporučení uvedená v pokynech, které jsou dodávány s originálním přístrojem, a řiďte se jimi. Věnujte prosím pozornost zvláště pokynům týkajícím se bezpečnosti.

Popis produktu

AIR-FLOW® Perio (profylaktický prášek) se používá výhradně pro subgingivální ošetření.

Tento prášek se používá ve stomatologii společně se zařízeními pracujícími na principu aeroabrazie.

Oblast použití

Tento prášek odstraňuje subgingivální biofilm a doporučuje se na následující postupy:

- Odstraňování periodentálního biofilmu,
- Údržba při periodentální léčbě po dokončení počátečního ošetření,
- Údržba implantátů (včetně leštěného titanu),

Tento prášek lze používat na standardní supragingivální ošetření podle popisu v návodu k systému AIR-FLOW a zvláště se hodí na citlivá supragingivální ošetření, jako jsou:

- Zabarvení v okolí sulku,
- Ošetření za přítomnosti skrytých kompozitů,
- Čištění citlivých oblastí.

Použití

U perio kapes nad 5 mm (do 9 mm) použijte trysku perio na nejdéle 5 sekund.

U mělkých perio kapes (do 5 mm) použijte standardní násadec AIR-FLOW® na každou stranu zubu (vestibulární, meziální, orální, distální, lingvální) nejdéle na 5 sekund na každou kapsu.

 Nezaměřujte postřik na jedno místo; pomocí kruhového pohybu dosáhnete homogenního vyčištění,

 Hrot násadce by měl směřovat ke špičce zubu a úhel se může lišit od 30° do 60°. Čím je úhel menší, tím dále bude prášek proudit do kapsy.

Kontraindikace

 Pacienti trpící infekcí horních cest dýchacích chronickou bronchitidou nebo astmatem se za žádných okolností nesmí ošetřovat přístrojem pracujícím na principu aeroabraze. Proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací potíže.

 Osoby s predispozicí mohou být citlivé na glykokol. Pokud zaznamenáte alergické reakce, přestaňte výrobek používat a zcela odstraňte prášek z úst.

 Léčba hlubokých periodontálních váčků může způsobit bakteriémií. Používejte příslušná omezení pro léčbu rizikových skupin pacientů (všeobecná snížená imunita, endokarditida).

 Proud prášku nesměrujte přímo na výplně, korunky nebo můstky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

Doporučení pro ošetření

 Pacient i uživatel musí být vybaveni ochranou očí.

 Osoba provádějící ošetření musí být vybavena maskou a rukavicemi.

 Používejte vysokorychlostní odsávačku stomatologické soupravy.

 Tento prášek nedokáže odstranit kameny a zubní kámen.

 K ochraně rtů pacienta použijte přípravek Vaseline®.

 Po manipulaci si umyjte ruce.

 Po použití umyjte pacientovi obličej (např. vlhčenými ubrousky).

Kontraindikace

 Pacienti trpící infekcí horních cest dýchacích chronickou bronchitidou nebo astmatem se za žádných okolností nesmí ošetřovat přístrojem pracujícím na principu aeroabraze. Proud vzduchu a prášku může způsobit dýchací potíže.

 Osoby s predispozicí mohou být citlivé na glykokol. Pokud zaznamenáte alergické reakce, přestaňte výrobek používat a zcela odstraňte prášek z úst.

 Léčba hlubokých periodontálních váčků může způsobit bakteriémií. Používejte příslušná omezení pro léčbu rizikových skupin pacientů (všeobecná snížená imunita, endokarditida).

 Proud prášku nesměřujte přímo na výplně, korunky nebo můstky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

Doporučení pro ošetření

 Pacient i uživatel musí být vybaveni ochranou očí.

 Osoba provádějící ošetření musí být vybavena maskou a rukavicemi.

 Používejte vysokorychlostní odsávačku stomatologické soupravy.

 Tento prášek nedokáže odstranit kameny a zubní kámen.

 K ochraně rtů pacienta použijte přípravek Vaseline®.

 Po manipulaci si umyjte ruce.

 Po použití umyjte pacientovi obličej (např. vlhčenými ubrousky).

Obecné informace

- Nepřekračujte maximální množství náplně, které je uvedeno na práškové komoře.
- Prášek neobsahuje cukr.

Uchování a doba skladovatelnosti

- Prášek by neměl být uchováván v blízkosti zdrojů tepla.
- Skladovací podmínky: do 25 °C, relativní vlhkost 10 % až 90%.
- Podmínky přepravy: -29°C až +38°C, relativní vlhkost 10 % až 90%.
- Po uplynutí doby expirace prášek nepoužívejte.

Další nabídka:

- AIR-FLOW® CLASSIC s příchutěmi: citron, máta, černý rybíz, třešně, tropické ovoce a neutrální chuť (pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT (pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® SOFT (neobsahující sůl, pro supragingivální ošetření).
- AIR-FLOW® PLUS (neobsahující sůl, pro subgingivální a supragingivální ošetření).

Složení prášku:

- Glycin
- Amorfní oxid křemičitý



Upozorňujeme, že anglický text těchto pokynů je znění, z něhož byly pořízeny všechny překlady. V případě jakékoliv nesrovnalosti je závazná anglická verze textu.



CE symbol Refers to directive 93/42 EEC
Marquage de conformité CE Se rapporte à la directive 93/42 CEE
Konformitätskennzeichen Bezieht sich auf die Richtlinie 93/42 EWG
Signo de conformidad CE Hace referencia a la norma 93/42 CEE
Marcatura di conformità CE Secondo la direttiva 93/42 CEE
CE symbol Enlig direktiv 93/42 EWG

To sú
Symb
Mapk
Symb
CE se
Marca