



Alkoholové
ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem.

mikroqid® AF wipes

Naše plus:

- Jednoduchá manipulace a snadné použití
- Rychlý a razantní dezinfekční efekt
- Okamžitě k použití
- Dobrá materiálová snášenlivost

Oblast použití:

mikroqid® AF wipes se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např.:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Operační stoly a okolní povrchy
- Zdravotnické prostředky

Návod na použití:

Předem odstraňte z povrchu nebo předmětu viditelné nečistoty. Vytáhněte ubrousek z plastické dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu. Nechejte zaschnout. Používejte pouze na suché a studené povrchy. Pro dezinfekci větších ploch použijte více ubrousků. Po použití dózu důkladně uzavřete.

Doporučená doba expozice:

1 min nebo do zaschnutí

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní

Účinnost	Norma	Expozice
Baktericidní	EN 13727	1 min.
MRSA	DGHM	1 min.
Levurocidní (C. Albicans)	EN 13624	1 min.
Fungicidní (C. Albicans, A.Niger)	EN 1650 EN 13697	1 min.
Virucidní (BVDV/ Vaccinia/ Rota)	DVV/RKI	30 s
Virucidní (Noro)	DVV/RKI	1 min.
Virucidní (Adeno)	DVV/RKI	2 min.
Virucidní (Polyoma SV40)	DVV/RKI	10 min.
Virucidní (Polio)	DVV/RKI	30 min.
Mykobaktericidní (M.avium, M. terrae)	EN 14348	1 min.

mikrozid® AF wipes

Složení:

100 g roztoku mikrozid® AF wipes obsahuje následující aktivní látky:

- 35 g Propal-1-ol
- 25 g Ethanol

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled hustota hodnota pH	ubrousky napuštěné bezbarvou kapalinou cca. 0,85 g/cm ³ / 20 °C cca. 20 / 20 °C
---------------------------------	--

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické nástroje použijte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy). Po otevření výrobce garantuje účinnost po dobu 3 měsíců. Po použití dózu vždy těsně uzavřete.

Logistické informace:

Název produktu	Velikost balení	Ks v kartonu
mikrozid® AF wipes	Dóza 150 ubrousků, rozměr ubrousku 18x14 cm	10
	Náhradní náplň 150 ubrousků, rozměr ubrousku 18x14 cm	20
	Dóza Jumbo 200 ks ubrousků	10
	Náhradní náplň Jumbo 200 ks ubrousků	12

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Doba expirace:

30 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 0297]



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.



Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Rober- Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 725 835 047
Area Sales manažer ČR: tel.: +420 724 013 101
Manažer pro distributory ČR: tel.: +420 724 176 368
Area Sales manažer SR: tel.: +421 911 288 808
Manažer pro distributory SR: tel.: +421 903 262 932

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 326
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk