

METASYS



GREEN&CLEAN M2

Duální, aktivní odpěňovací koncentrát k dezinfekci a dezodorizaci odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu

GREEN&CLEAN M2 - zelená

Chemická charakteristika:

Alkylamin, čtyřmocné sloučeniny amoniaku, odpěňovací prostředek, enzymy, tenzidy

Bezpečnostní doporučení:

R34 - Způsobuje poleptání. S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. S39 - Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

Dimethyldioktylamoniumchlorid	5538-94-3
Benzalkoniumchlorid	61789-71-7
3-aminopropyl-dodecylpropan-diamin	2372-82-9

GREEN&CLEAN M2 – červená

Chemická charakteristika:

Alkylamin, alifatické sloučeniny dusíku, odpěňovací prostředek, enzymy, tenzidy


Bezpečnostní doporučení:

R34 - Způsobuje poleptání. S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. S39 - Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

Dimethyldioktylamoniumchlorid	5538-94-3
Kokso-propylendiaminguanidinacetát	85681-60-3
3-aminopropyl-dodecylpropan-diamin	2372-82-9



bakterizid fungizid
HBV/HCV/HIV
tuberkulizid

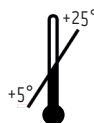

CE
0408



UN 1903

e 480 ml

METASYS Medizintechnik GmbH ♦ Florianistr. 3 ♦ A-6063 Rum bei Innsbruck/Austria
Tel.: +43-(0)512-2054200 ♦ Fax: +43-(0)512-2054207 ♦ www.metasys.com

GREEN&CLEAN M2

Dezinfikovat snadno:



► 1. Dávkování

Dvakrát stiskněte čerpadlo dávkovače. Tím se do míchací nádoby přenesou přesně 6 ml přípravku GREEN&CLEAN M2.



► 2. Míchání

Odeberte míchací nádobu od dávkovače (sejměte ji směrem nahoru). Nádobu míchače naplňte vodou až ke značce (je nastaven na 600 ml). Takto vytvořený aplikační roztok je 1%.



► 3. Odsávání

Krátkou sací hadici přidržte tak dlouho na sacím otvoru označeném 1, až uslyšíte nasávání vzduchu. Tím automaticky nasajete v nejkratší době správné množství 200 ml aplikačního roztoku. Velkou sací hadicí pojeďte stejně a používejte 2 označené sací otvory.



► 4. Dezinfekce plivátka

V míchací nádrži zůstane zbytek 200 ml, ten jednoduše vyprázdněte do misky.

Dezinfekce odsávacího zařízení a plivátka se musí provádět dvakrát denně. Po chirurgických zákrocích je třeba provést ještě další zvláštní čištění! Tím je zaručeno splnění maximálních hygienických požadavků a hladká funkce odlučovače amalgámu.