



DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VE STOMATOLOGII

DENTASEPT SH PRO Wipes

DENTASEPT SH PRO WIPES JSOU DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ UBROUSKY K PŘÍMÉMU POUŽITÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY VE STOMATOLOGII

Kombinuje široké spektrum účinnosti s krátkou dobou expozice, má vynikající materiálovou kompatibilitu a jemné vlastnosti.

Ubrousky Dentasept SH Pro Wipes jsou vhodné pro různé zdravotnické prostředky. V praxi lze používat podle interních směrnic zdravotnického zařízení, zabezpečuje účinnosti potřebné k omezení šíření patogenů.

- Vhodné i pro materiály citlivé na alkohol
- Účinné složení bez parfemace a barviv
- Dezinfekce a čištění v jednom kroku, zanechává vše viditelně čisté
- Ubrousky z viskózy, 100% biologicky odbouratelného materiálu



DENTASEPT SH PRO Wipes

Kombinuje široké spektrum účinnosti s krátkou dobou expozice, má vynikající materiálovou kompatibilitu (včetně materiálů citlivých na alkohol) a jemné vlastnosti

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Dezinfikuje a čistí v jednom kroku
- Bez obsahu alkoholu, parfemace a barviv
- Široké spektrum účinnosti a optimální doba působení
- pH 6
- Kompatibilita se širokou škálou materiálů, včetně polymerů (např. polykarbonát, plexisklo)
- Dentasept SH Pro Wipes je ze 100% viskózy

NÁVOD K POUŽITÍ



1) Ubrousky k přímému použití. Po otevření doba použitelnosti podle EN 16615: 3 měsíce.



2) Aplikujte na celý povrch ošetřené místo, použijte tolik ubrousků, kolik je potřeba.



3) Minimální doba expozice: 2 minuty. Důkladně opláchněte pitnou vodou ošetřené místo zdravotnického prostředku, která mají přijít do styku s pokožkou nebo ústní sliznicí, s výjimkou přípravků ošetřených zabalením.



4) Po každém použití obal řádně uzavřete. Ubrousek nepoužívejte opakovaně, účinnost již nelze zaručit.

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

PODMÍNKY	DOBA EXPOZICE
Baktericidní* účinnost podle EN 16615 (2 min), EN 13727 (1 min)	2 min
Účinnost proti kvasinkám* podle EN 16615 (2 min), EN 13624 (2 min)	2 min
Tuberkulocidní* účinnost podle EN 14348	60 min
Účinnost proti obaleným virům* podle EN 14476	1 min
Účinnost proti Polyomaviru SV 40* podle EN 14476	5 min
Účinnost proti Rotaviru* podle EN 14476	30s
Omezeně virucidní* účinnost podle EN 14476	30 min
Adenovirus	30 min
Norovirus (MNV)	15 min

* Nečisté podmínky

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Dentasept SH Pro Wipes	6 x 100 utěrek (180 x 200 mm)	3127040



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Odštepny závod
Vocťárova 2449/5
Praha 8, 180 00
Česká republika

Distributor pro ČR:
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Rivergate D1/4OG
Handelskai 92
1200 Wien
Austria



www.anios.com

OBLAST POUŽITÍ

Ošetření zdravotnických prostředků ve stomatologii:

- Mezi každým pacientem: čištění a dezinfekce neinvazivních zdravotnických prostředků, které nelze dezinfikovat ponorem, jako jsou těla vytvrzovacích světel;
- Před krokem čištění, dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků (například rotačních násadců, turbín, kolének) a v souladu s použitím doporučeným výrobcem: zabalte a/ nebo otřete v případě transportu do sterilizační místnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1) Ubrousky k přímému použití. Po otevření doba použitelnosti podle EN 16615: 3 měsíce.
- 2) Aplikujte na celý povrch ošetřené místo, použijte tolik ubrousků, kolik je potřeba.
- 3) Minimální doba expozice: 2 minuty. Důkladně opláchněte pitnou vodou ošetřené místo zdravotnického prostředku, která mají přijít do styku s pokožkou nebo ústní sliznicí, s výjimkou přípravků ošetřených zabalením.
- 4) Po každém použití obal řádně uzavřete. Ubrousek nepoužívejte opakovaně, účinnost již nelze zaručit.

SLOŽENÍ

Impregnační roztok obsahuje: Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid, pomocné látky.

CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální účinnost přípravku Dentasept SH Pro Wipes je zahrnuta ve vědecké dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

SKLADOVÁNÍ

Skladování: +5°C až +25°C.

POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.