

Popis produktu

Univerzální dentinový tmel (Universal Dentin Sealant) je biokompatibilní, nepolymerizovatelná, vysokomolekulární pryskyřice v ethanolovém nosiči. U všech popsaných produktů si před použitím pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace v bezpečnostních listech.

Formy balení

- 1,2 ml injekční stříkačka
- Dodaná špička:
 - Špička štětce Black Mini™

Indikace pro použití/Účel použití

Univerzální dentinový tmel (Universal Dentin Sealant) utěšuje obnažené dentinové tubuly proti agresivním dráždivým pryskyřicím, kyselinám, cementům a výplňovým chemikáliím a lze jej použít jako běžný lak pod amalgámové výplně. Doporučuje se pro zmírnění citlivosti po operaci kořenů a odstraňování zubního kamene.

Kontraindikace

- Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí na pryskyřice.
- Pacienti nebo uživatelé s obavami z alergií se mohou seznámit s dokumentem o alergenech výrobku, který je k dispozici na stránkách ultradent.com. Pokud je pozorována alergická reakce, důkladně opláchněte exponovanou oblast vodou a požádejte pacienta, aby se poradil se svým lékařem.

Varování a bezpečnostní opatření

- Pryskyřice mohou být senzibilizující. Zabraňte opakovanému kontaktu nevytvrzené zubní pryskyřice s kůží a/ nebo s měkkými tkáněmi. Pokud se objeví alergická reakce, dermatitida nebo vyrážka, poraďte se s lékařem.
- Pacienti a zubní lékaři musí nosit ochranné brýle s bočními štíty.
- Při požití přípravku vypijte velké množství vody a kontaktujte lékaře. Pokud je produkt vdechnut, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

- Používejte pouze doporučené kanyly
- Kanyly jsou pouze na jedno použití
- Aby nedošlo k ucpání, mezi každým použitím odstraňte kanylu a znovu ji zakryjte uzávěrem Luer Lock.

Pokyny krok za krokem

- 1) Odstraňte uzávěr Luer Lock a nasadte doporučenou špičku.
- 2) Oblast důkladně izolujte, vyčistěte a vysušte.
- 3) Před intraorálním expresí ověřte průtok, barvu a konzistenci. Pokud se setkáte s odporem, vyměňte špičku a zkuste to znovu.

Použití

- 1) Vmasírujte Univerzální dentinový tmel (Universal Dentin Sealant) do obnaženého dentinu a jemně nechte 5-10 sekund zaschnout na vzduchu. Pokud citlivost přetrvává, naneste další vrstvy a překontrolujte je vzduchem.
- 2) Při použití jako lak při zubních kazech pod amalgámové náhrady naneste Univerzální dentinový tmel (Universal Dentin Sealant) na dno a stěny dutiny, vyhněte se okraji povrchu dutiny. Sušte na vzduchu po dobu 5—10 sekund.

Zpracování

Abyste zabránili křížové kontaminaci, otřete stříkačku mezi použitím dezinfekčním prostředkem střední úrovně účinnosti a použijte jednorázový ochranný návlek. Pokud se nepoužívá ochranný návlek, stříkačka by měla být považována za jednorázovou.

Skladování a likvidace

Skladujte v souladu se štítkem na vnějším obalu.

Zlikvidujte odpad v souladu s místními pravidly, pokyny a předpisy.

Ostatní informace

Jakýkoli závažný incident nahláste výrobci a příslušnému orgánu.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200