

Spee-Dee™ Build-Up

PULPDENT

Spee-Dee™ Build-Up

Víceúčelová pryskyřice pro dostavbu zubů

Duálně tuhnoucí • Uvolňující fluoridy • Hydrofilní • Rentgenkontrastní

POPIS VÝROBKU

Spee-Dee Build-Up je víceúčelový, duálně tuhnoucí zubní dostavbový materiál na bázi pryskyřice. Je hydrofilní a má samoadhezivní a samoleptací složky, které jsou kompatibilní se všemi bondovacími systémy. Materiál uvolňuje fluoridy a je rentgenkontrastní. Neobsahuje bisfenol A, bis-GMA ani deriváty BPA.

INDIKACE

Víceúčelový zubní materiál na dostavbu zubů na bázi pryskyřice

KONTRAINDIKACE

Není určeno pro přímé překrytí dřeně.

JAK POUŽÍVAT DVOJITOU KARTUŠI

1. Odstraňte uzávěr. Je-li to nutné, zatlačte na kartuši tak, aby báze i katalyzátor byly u ústí kartuše. Umístěte míchací kanylu na kartuši.
2. Pro zajištění rovnoměrného promíchání báze a katalyzátoru naneste 2-3 mm materiálu na podložku a tento materiál vyhodte.
3. Rovnoměrně promíchaný materiál nadávkuje přímo na zub.
4. Vyhodte míchací kanylu. Znovu zavíčkujte kartuši. Zabraňte křížové kontaminaci báze a katalyzátoru.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte starou výplň a/nebo kaz nebo připravte zub pro umístění čepu
2. Pro dosažení nejvyšší pevnosti spoje leptejte a použijte bondovací systém podle pokynů výrobce. Vytvrďte světlem. Pro samotuhnoucí a duálně tuhnoucí pryskyřičné materiály se doporučuje duálně tuhnoucí bondovací systém.
3. Odstraňte víčko z kartuše. Je-li to nutné, zatlačte na kartuši tak, aby báze i katalyzátor byly u ústí kartuše.
4. Umístěte míchací kanylu na kartuši a vložte ji do příslušné aplikační pistole 1:1. Pro zajištění rovnoměrného promíchání báze a katalyzátoru naneste 2-3 mm materiálu na podložku a tento materiál vyhodte.
5. Nadávkuje materiál na připravené místo nebo nadávkuje do otvoru pro čep a umístěte čep. Vytvrzujte světlem po dobu 20 sekund. Vytvořte dostavbu pomocí techniky „Crown Up“ umístěním materiálu, vytvrzením, přidáním dalšího materiálu, vytvrzením a opakováním tohoto postupu, dokud nedosáhnete požadované velikosti. Materiál se také samovytvrzuje. Doba tuhnutí anaerobního samotuhnutí při 37°C je 3 minuty a 15 sekund. Opatrně zavíčkujte kartuši. Zabraňte křížové kontaminaci báze a katalyzátoru.
6. Preparujte dostavbu pro budoucí náhradu.

Poznámka: Před aplikací u každého pacienta použijte jednorázové návleky/obaly na dávkovače pro opakované použití. Další informace naleznete na: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

VAROVÁNÍ

Nezpolymerovaný materiál může při kontaktu způsobit podráždění očí nebo pokožky. Je doporučeno nosit ochranné brýle a chirurgické rukavice. Nepřekračujte výrobcem doporučenou dobu osvitu pro lampu, kterou používáte.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

- Skladujte pevně uzavřené v původním obalu při pokojové teplotě. Chraňte před přímým světlem, extrémními teplotami a zdroji zapálení, zabraňte křížové kontaminaci báze a katalyzátoru.
- Doba použitelnosti neotevřeného výrobku: 2 roky od data výroby.
- Ihned po použití znovu uzavřete uzávěrem.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ UDÁLOSTI

Jakékoli závažné nepříznivé události týkající se produktu by měly být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém k události došlo, nebo jinému příslušnému regulačnímu úřadu.

Hlášení závažné nepříznivé události je třeba zaslat na adresu:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262


e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Poznámka: Seznam látek obsažených v tomto produktu naleznete v bezpečnostním listu Safety Data Sheet.



PULPDENT Corporation

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.
(617) 926-6666 / (800) 343-4342 / Fax (617) 926-6262
www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com

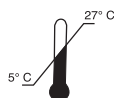

XP-SPEE-IN-CZ
REV: 07/2022