

Cervitec® Gel – gel pro péči o ústní dutiny

Doporučené použití

- K podpoře dentální péče a k léčbě gingivitidy, mukositivity a stomatitidy způsobené zubní náhradou.
- K dentální péči a na podporu léčby při parodontitidě a periimplantitidě.
- K prevenci zubního kazu u rizikových skupin.
- K potlačení aktivity bakterií.
- Proti halitóze (zápachu z úst).
- K dentální péči o sliznice a jejich zvlhčování.

Podle svých potřeb můžete přípravek Cervitec Gel

- nanášet přímo na dásně, sliznice ústní dutiny, jazyk a zuby nebo na vnitřní stranu snímatelných náhrad.
- nanášet na mezizubní kartáček za účelem vyčištění mezizubního prostoru, ortodontických aparátů nebo fixních náhrad – například můstků či implantátů.
- nebo jej použít k čištění zubů. Zuby nadále čistěte jednou denně Vaší obvyklou zubní pastou.
- nanášet do individuálních nosičů a nosit je jednou až dvakrát denně po dobu 5 až 10 minut. Tento postup doporučujeme opakovat každé 3 až 4 měsíce v délce 2 až 14 dnů

Délka užívání

- I při použití delším než čtyři týdny se neočekává zbarvení zubů nebo problémy s vnímáním chuti.

Tip

Po použití nevyplachujte! Podpoříte tím účinek přípravku Cervitec Gel.

Poznámka

- Obsahuje fluorid sodný. Obsah fluoridu: 900 ppm.
- Pro děti mladší 6 let: Použijte pouze množství gelu o velikosti hrášku. Aby se zabránilo nadměrnému polykání, mělo by čištění zubů probíhat pod dohledem. Jestliže je fluorid podáván ještě další formou, poraďte se se svým lékařem nebo zubním lékařem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pouze pro použití v zubním lékařství.

Materiál byl vyvinut výlučně pro použití v zubním lékařství. Zpracování je nutné provádět výhradně podle návodu k použití. Nelze přijmout odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním pokynů nebo stanovené oblasti použití. Uživatel odpovídá za testování materiálu z hlediska jeho vhodnosti a použití pro jakékoliv účely výslovně neuvedené v návodu. Popisy a údaje nepředstavují žádnou záruku vlastností a nejsou závazné.