

Popis

Cervitec® F je dentální lak pro mechanickou ochranu struktury zubu. Obsahuje fluoridy a má antimikrobiální působení. Lak je určen k profesionálnímu použití v zubních ordinacích a k použití speciálně vyškoleným personálem v terénních podmínkách. Inovativní systém laku je charakteristický vysokou mírou tolerance vůči vlhkosti při aplikaci.

Složení

Alcohol, Aqua, VA/Crotonates Copolymer, Cetylpyridinium chloride, Chlorhexidine diacetate, Ammonium fluoride, Aroma, Saccharin

Obsahuje fluorid amonný. Obsah fluoridu: 1400 ppm

Aplikace

- Prevence zubního kazu u rizikových skupin
- Fluoridace zubní skloviny
- Remineralizace počínajících lézí
- Ochrana hypersenzitivních zubů
- Antimikrobiální působení

U pacientů s prokázanou alergií na některou ze složek přípravku Cervitec F by se materiál neměl používat.

Cervitec F by měl aplikovat zubní lékař nebo odborně vyškolený pracovník. Cervitec F je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Obecně se doporučuje aplikovat přípravek Cervitec F jednou za tři měsíce. Je-li to nutné, lze jej aplikovat i v kratších intervalech.

Dávkovací tuba 4 g: Obsah vystačí přibližně na 17 aplikací na všechny zuby horní i dolní čelisti.

Dávkovací tuba 7 g: Obsah vystačí přibližně na 30 aplikací na všechny zuby horní i dolní čelisti.

Jednodávkové jednotky: Obsah vystačí na 1 aplikaci na všechny zuby horní i dolní čelisti.

Popis postupu v jednotlivých krocích

1. Vyčistěte povrchy zubů.
2. Izolujte oblast aplikace vatovými válečky a vatovými tyčinkami. Použití savky nebo vzduchové pistole je nepovinné.
3. a) Jednodávková jednotka: Odstraňte fólii a naneste lak přímo z jednodávkové jednotky.
b) Dávkovací tuba: Naneste požadované množství například do skleničky Dappen a tubu opět uzavřete.
4. Naneste tenkou vrstvu laku například pomocí štětečku Vivabrush G.
5. Nechte lak po dobu 1 minuty zaschnout a poté vyjměte vatové válečky.
6. Po aplikaci není potřeba vyplachovat ústa, stačí vyplivnout.

Po dobu 1 hodiny po aplikaci laku Cervitec F by pacienti neměli jíst ani pít.

Poznámky

Kontakt se sliznicí může vyvolat krátkodobé podráždění, které postupně odezní.

Při zasažení očí lakem okamžitě důkladně vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte oftalmologa.

Doba použitelnosti a uchovávání

- Bezprostředně po použití dávkovací tubu pečlivě uzavřete.
- Jednodávkové jednotky a nástroj Vivabrush G jsou určeny pouze k jednorázovému použití.
- Vysoce hořlavé. Chraňte před zdroji vznícení.
- Nepoužívejte po uplynutí vyznačeného data použitelnosti.
- Výrobek uchovávejte při teplotě 2–28 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí!**Pouze pro použití v zubním lékařství.**

Materiál byl vyvinut výlučně pro použití v zubním lékařství. Zpracování je nutné provádět výhradně podle návodu k použití. Nelze přijmout odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním pokynů stanovené oblasti použití. Uživatel odpovídá za testování výrobků z hlediska jejich vhodnosti a použití pro jakékoliv účely výslovně neuvedené v návodu. Popisy a data nepředstavují žádnou záruku vlastností a nejsou závazné.