

Nic Tone Rubber Dam

Popis

Koferdam pro profesionální použití.

Latexová fólie nebo fólie bez obsahu latexu pro vyrazení otvoru v materiálu, který umožňuje nasazení kolem zubu během endodontického zákroku. Izolace koferdamem minimalizuje riziko kontaminace bakteriemi systému kořenových kanálků. Je výhodou při pomoci pro dobré vizualizaci čistého operačního pole a brání polknutí nebo vdechnutí dentálních materiálů, výplachů a nástrojů.

Návod na použití

- Koferdam a příslušenství je připraveno k okamžitému použití.
- Určete operační pole.
- Označte na fólii pozice otvorů a vyražte je příslušným instrumentáři.
- Vyberte správnou sponu a upevněte ji do kleští.
- Pro izolaci v posteriorním úseku vždy izolujte jeden zub distálně od ošetřovaného zubu (zubů) a protáhněte směrem ke středové ose čelisti. Izolace v anteriorním úseku zahrnuje oblasti od premoláru k premoláru.
- Umístěte sponu přes zub nejprve lingvální stranou sevřených čelistí a pak teprve labiálními čelistmi. Během adaptace bude možná nutné přidržet sponu prstem, aby spona nevyklouzla než bude řádně usazena.
- Napněte koferdam, který byl dosud protáhnut přes kotvící zub.
- Ligatura (floss – zubní nit) by měla být uvolněná a v případě potřeby dobře uchopitelná.
- Nasad'te rámeček přes koferdam a pomalu aretujte za nýty v rámečku.
- Napněte poslední část celého koferdamu přes poslední zub, který má být odkryt na zubu na protilehlé straně proti kotevnímu zubu.
- Pomocí ukazováčku natáhněte koferdam přes sponu. U obtížnějších bodů kontaktu použijte voskovanou zubní nit. Lingvální konec nitě je obtočen a zasunut do aproximálního bodu kontaktu a současně s tím je vtlačěn koferdam. Odstraňte nit zatažením za oba konce, aniž byste porušili nasazený koferdam.
- Okraje koferdamu zatlačte dobře do gingiválního sulku.
- Pokud má pacient problém s dýcháním, vytrhňte malý otvor tvaru písmene U těsně pod nosem tak, aby průchod vzduchu do nosu nebyl blokován a pacient mohl snadno dýchat.

Prezentace

Tloušťky: Thin (tenký), Medium (střední), Tick (tlustý)

Balení: krabice 36 kusů

Zelený 6x6 nebo 5x5

Modrý 6x6 nebo 5x5

Černý 6x6 nebo 5x5

MANUFACTURERA DENTAL CONTINENTAL, S.A DE C.V.
Ind. Del Plástico No. 2113 Fracc. Ind Zapopan Norte
C.P. 45210, Mpio. Zapopan Jal Tel 01333 656 4780