

VivaDent® Aerosol Reduction Gel

pro redukci rozprašovací mlhy a aerosolů
při použití ultrazvukového scalingu

- Snížení* množství aerosolů produkovaných ultrazvukovými scalery až o 99 %
- Lepší viditelnost ošetřované oblasti během ultrazvukového scalingu
- Zvýšený komfort pacienta díky menšímu množství aerosolů na obličeji

Složení

Polyethylenoxid, glycerol


Varování

- VivaDent Aerosol Reduction Gel uchovávejte mimo dosah dětí
- Pouze pro použití ve stomatologii!
- VivaDent Aerosol Reduction Gel nenalévejte přímo do nádrčky určené pro chladicí tekutinu ultrazvukového scaleru

Poznámka:

- Při používání ultrazvukových scalerů dodržujte místní a národní hygienické předpisy a pokyny výrobce
- Po ultrazvukovém scalingu s použitím VivaDent Aerosol Reduction Gel je nutné přístroj opláchnout pitnou vodou
- Vhodné pouze pro ultrazvukové scalery s externí nádrží pro chladicí tekutinu. Nevhodné pro vzduchové pískovače

* Snížení množství aerosolu je závislé na amplitudě hrotu scaleru

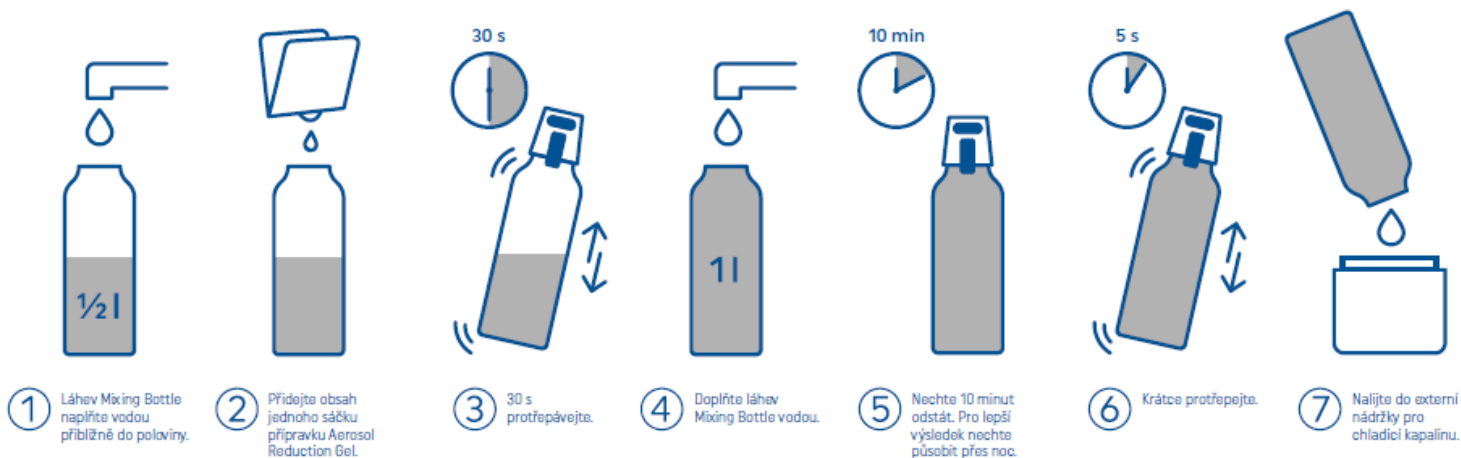

VivaDent® Mixing Bottle

Snadná manipulace: opakovaně použitelná láhev
pro míchání roztoků

Nádoba na směšování a skladování roztoků

Láhev VivaDent Mixing Bottle čistěte po každém použití konvenčními čisticími prostředky