

Ivoclean®

[cs] Návod k použití

Extraorální čistící pasta pro nepřímé náhrady

Rx ONLY



Manufacturer:
Ivoclar Vivadent AG
Benderstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclar.com

Date information prepared:
2025-05-23 / Rev. 0

ivoclar

Česky

Popis

Ivoclean® je univerzální čistící pasta vhodná pro neabrazivní čištění vazebných povrchů protetických náhrad po jejich intraorální zkoušce. Ve výsledku napomáhá k dosažení spolehlivých výsledků adhezivní cementace.

Složení

Disperze částíček oxidů kovů ve vodě.

Indikace

Extraorální čištění kondicionovaných povrchů keramických a kovových náhrad, které byly kontaminovány během intraorální zkoušky.

Kontraindikace

Přípravek Ivoclean je kontraindikován:

- pokud nelze použít stanovenou pracovní techniku;
- pokud se čištění provádí intraorálně;
- k čištění náhrad, které přišly do kontaktu s pastami na bázi silikonu.

Interakce

Po čištění se musí vazebný prostředek znovu nanést na povrchy, které byly předtím silanizovány a ošetřeny primerem.

Aplikace

Lahvičku před použitím protřepejte.

Bez ohledu na to, zda náhrady byly předtím kondicionovány, nebo nikoli, je třeba je vyčistit podle následujícího protokolu k čištění:

- Po zkoušce náhradu důkladně opláchněte vodní sprchou a osušte vzduchem bez příměsí oleje.
- Na celou vazebnou plochu náhrady naneste vrstvu přípravku Ivoclean pomocí mikroštetčku nebo štětce.
- Ponechte čistící účinek přípravku Ivoclean působit po dobu 20 sekund, poté náhradu důkladně opláchněte vodní sprchou a osušte vzduchem bez příměsí oleje.
- Následně naneste na vazebné plochy náhrady vhodný vazebný prostředek (např. Monobond® Plus). Dodržujte přitom návody k použití použitého vazebného prostředku a upevňovacího materiálu.

Doplňující poznámky

Po vyčištění pomocí přípravku Ivoclean je třeba důsledně zamezit kontaminaci náhrady slinami nebo krví.

V případě kontaminace se celý postup ošetření náhrady musí zopakovat.

Po čištění se vazebný prostředek musí znovu nanést na povrchy, které byly předtím silanizovány a ošetřeny primerem.

Varování

- Způsobuje poleptání.
- V případě nehody, nebo pokud cítíte nevolnost, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Nevdechujte výpary/aerosoly.
- V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/obličeje.
- Při používání nejezte ani nepijte.
- Tento materiál a jeho obal musí být zlikvidován v rámci nebezpečného odpadu.

Doba a způsob skladování

- Ivoclean skladujte při teplotách 2–28 °C.
- Nepoužívejte Ivoclean po datu expirace.
- Uzavírejte lahvičku okamžitě po použití.
- Doba použitelnosti: viz údaje na stříkačkách a obalech.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Určeno pouze pro stomatologické účely!

Tento materiál byl vyvinut výhradně pro stomatologické použití. Zpracování se musí provádět důsledně podle návodu k použití. Neneseme odpovědnost za škody způsobené nedodržáním návodu nebo uvedením oblasti použití. Uživatel nese odpovědnost za otestování materiálů z hlediska jejich vhodnosti a použití pro jakýkoli účel, který není výslovně uveden v návodu k použití. Popisy a údaje nepředstavují záruku vlastností a nejsou závazné.

ivoclar.com

ivoclar