

Popis

Fluor Protector S je ochranný fluoridový lak pro snížení citlivosti zubů a prevenci proti kazům.

Účel použití

Ochrana zubů

Složení

Etanol, voda, polymer, aditivum, sacharin, mátová příchut', 1,5% fluorid amonný (odpovídá 7700 ppm fluoridu).

Indikace

- Léčba přecitlivělých zubních krčků
- Zvýšení odolnosti skloviny vůči kyselinám
- Dlouhodobá prevence zubního kazu
- Léčba citlivosti po bělení zubů

Kontraindikace

U pacientů s prokázanou alergií na některou ze složek přípravku Fluor Protector S by se materiál neměl používat.

Nežádoucí účinky

Slabý dočasný pocit pálení se může vyskytnout v případě, že přípravek přijde do styku se sliznicí.

Použití

Fluor Protector S aplikují zubní lékaři a zubní specialisté. Fluor Protector S je vhodný pro léčbu pacientů všech věkových kategorií.

Poznámka: Děti mladší sedmi let, které užívají systémově fluorid (fluoridové tablety) by měly tuto léčbu vysadit na několik dnů po použití přípravku Fluor Protector S, aby se předešlo předávkování fluoridem.

Obecně se přípravek Fluor Protector S používá v šestiměsíčních intervalech. Lze indikovat kratší intervaly, například v případě vyššího rizika kazů nebo eroze.

Balení 4 g: Obsah postačí na 17 aplikací všech zubů horní i dolní čelisti.

Balení 7 g: Obsah postačí na 30 aplikací všech zubů horní i dolní čelisti.

Jednodávková jednotka: Obsah dostačuje na jednu plnou sadu zubů.

Postup v jednotlivých krocích

1. Vyčistěte povrchy zubů.
2. Zajistěte suché pracovní pole pomocí vatových válečků, vatových tampónů, savky nebo vzduchové pistole, pokud to bude nutné.

3. a) Balení single dose: Odstraňte fólii a naneste lak přímo z dózičky.
b) Dávkovací tuba: Požadované množství vytlačte do dávkovací misky nebo do podobné nádoby a tubu uzavřete.
4. Naneste tenkou vrstvu pomocí štětečku Vivabrush G.
5. Nechte lak zaschnout jednu minutu, poté vyjměte vatové válčky.
6. Následně požádejte pacienta, aby vyplivl obsah z úst bez vypláchnutí.

Tipy pro pacienty

Pacienti by neměli jíst ani pít po dobu jedné hodiny po ukončení aplikace přípravku Fluor Protector S.

Skladování

- Bezprostředně po použití pečlivě uzavřete dávkovací tubu.
- Balení Single dose a štěteček Vivabrush G jsou určeny pouze k jednorázovému použití.
- Přípravek je vysoce hořlavý, a proto je zapotřebí chránit jej před zdroji vznícení.
- Po uplynutí data použitelnosti výrobek již nepoužívejte.
- Výrobek uchovávejte při teplotě 2–28 °C.

Skladujte mimo dosahu dětí!

Určeno pouze pro stomatologické účely!

Materiál byl vyvinut výlučně pro použití v zubním lékařství. Zpracování by se mělo provádět výhradně podle návodu k jeho použití. Nelze přijmout odpovědnost za škody vzniklé nedodržením pokynů nebo stanovení oblasti použití. Uživatel odpovídá za testování materiálu z hlediska jeho vhodnosti a použití pro jakékoliv účely výslovně neuvedené v návodu. Popisy a údaje nepředstavují žádnou záruku vlastností a nejsou závazné.

RO Instrucțiuni de utilizare
– Lac de protecție cu fluoruri

UK Інструкції щодо використання
– Захисний лак із фторидом

ET Kasutamisi juhend
– Fluoridid sisaldav kaitselakk

LV Lietošanas instrukcija
– Fluorīdu saturoša aizsargājoša laka

LT Naudojimo instrukcijos
– Apsaugojinis lakas su fluoridu

Rx ONLY

Date information prepared:
2019-05-23/ Rev. 2
641305/WW



NO Bruksanvisning
– Fluoridholdig beskyttelseslakk

NL Gebruiksaanwijzing
– Beschermende lak met fluoride

EL Οδηγίες Χρήσης
– Προστατευτικό φθορογόνο βερνίκ

TR Kullanma Talimatı
– Floritli koruyucu vernik

RU Инструкция по применению
– Фторосодержащий защитный лак

PL Instrukcja stosowania
– Lakier ochronny, zawierający fluor

CE 0482



Manufacturer:
Ivoclar Vivadent AG
Benderstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com

Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Solo per uso dentistico!

Il presente prodotto è destinato all'uso in campo odontoiatrico e deve essere utilizzato in conformità con le relative istruzioni per l'uso. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare dall'utilizzo improprio o da utilizzi diversi dalla prevista finalità d'uso. Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a verificare prima dell'uso l'idoneità e la possibilità di utilizzo del prodotto per il previsto scopo d'uso, tanto più se tale scopo d'uso non è menzionato nelle corrispondenti istruzioni per l'uso.