



GC Capsule Applier III

GC Capsule Applier III se používá se všemi GC kapslovanými stomatologickými cementy, aby se zajistilo snadné vytlačení namíchaného materiálu přímo do preparace.

Použití

Aplikace namíchaných GC kapslovaných stomatologických cementů z kapsle.

Návod k použití

1. Vložení kapsle

Po namíchání vložte a zafixujte kapsli do držáku (kapsle nemůže být vložena, jestliže píst je vytažen. Přesuňte píst do zadní pozice stlačením do uvolňovacího knoflíku.)

2. Vytlačení materiálu

Držte aplikátor a namiřte ústí kapsle do kavity nebo na míchací podložku. Pomalu 3 - 4x stlačte páku. Píst se pomalu pohybuje vpřed a vytlačuje namíchaný materiál tryskou (Fig.2) .

3. Odstranění kapsle

Stlačte uvolňovací knoflík, aby se píst vrátil do zadní polohy. Vyjměte použitou kapsli z aplikátoru malým otočením a vytlačení vzhůru (Fig.3).

Čištění

Aplikátor čistěte hadříkem namočeným v alkoholu.

Sterilizace

Aplikátor může být autoklávován při 121°-134° C na 10 - 30 minut.

Poznámka:

Použití různých chemických desinfekčních a sterilizačních prostředků může způsobit poškození aplikátoru a není proto doporučeno.

Názvy

Plunger = píst

Capsule Holder = držák kapslí

Release Button = uvolňovací knoflík

Lever = páka

Grip = držadlo.

Poznámky

1. Zabraňte použití Capsule Applier III u pacientů, kteří mají alergii na kov (hliník, nikl).
2. Nepoužívejte Capsule Applier III u pacientů, kteří mají alergii na kov, v případě alergie okamžitě zastavte používání a doporučte konzultaci u lékaře.
3. Ušetřující, který má alergii na kov, by neměl používat Capsule Applier III. V případě alergie okamžitě zastavte používání a vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Při používání aplikátoru dbejte na to, abyste si nepřivřeli ruku mezi páku a držadlo.
5. Tento výrobek by měl být používán pouze stomatology.
6. Tento výrobek by měl být používán dle popsaného návodu.

Poznámka

GC Capsule Applier III nemůže být používán s jinými než GC výrobky.

Balení

1 ks

Datum poslední revize 05/2012

GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode – Lueven 1240
Interleuven Laan 33, B – 3001 Leuven
Belgium

