

Zatlačte úzkou páčku (obr. 1.1/1) na zadní straně dávkovače Dispenser D2 směrem nahoru a šoupátko (obr. 1.1/2) zatáhněte zcela dozadu. Vyklopte plastovou západku (obr. 1.2/1) nahoru a vložte kartuši (obr. 1.2/2). Sejměte z kartuše uzávěr (obr. 1.3) jeho otočením o 90° proti směru hodinových ručiček a zahodte ho. Nasadte směšovací kanylu (obr. 1.4/1). Dbejte při tom na to, aby souhlasila vybraní na směšovací kanyle a kartuši. Otočením o 90° ve směru hodinových ručiček směšovací kanylu zaaretujte (obr. 1.4/2).

Prostřednictvím páčky (obr. 1.5) na dávkovači Dispenser D2 materiál ve směšovací kanyle smíchejte a rovnou aplikujte.

Vyjmutí kartuše:

Zatlačte páčku (obr. 2.1/1) nahoru a šoupátko (obr. 2.1/2) zatáhněte zcela dozadu. Vyklopte plastovou západku (obr. 2.2/1) nahoru a vyjměte kartuši (obr. 2.2/2).

Kartuši skladujte s použitou směšovací kanylou jako uzávěrem.

Pokyny pro zpracování podle normy EN ISO 17664

ÚČEL POUŽITÍ

Tato nesterilní ruční přístroj je určen k intraorálnímu a/nebo extraorálnímu (např. na otiskovací lžici) dávkování dvousložkových dentálních materiálů (např. elastomerových otiskovacích hmot, dentálních cementů) z kartuše. Jedná se o výrobek pro opakované použití.

INDIKACE

Určeno k použití s dentálními materiály, jako jsou elastomerové otiskovací hmoty a dentální cementy na cementace, kompozitní materiály na bázi pryskyřic na stavbu zubních pahýlů nebo bisakrylové materiály pro provizorní náhrady.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Vlastnosti výrobku z hlediska účinnosti splňují požadavky na určené použití.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy žádné kontraindikace.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Osoby ošetřované během stomatologického zákroku.

URČENÍ UŽIVATELÉ

Tento zdravotnický prostředek směji používat pouze odborně vyškolení zubní lékaři.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento dávkovací přístroj je dodáván v nesterilním stavu.

PŘÍPRAVA NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Demontáž (obr. 3/1-2).

OMEZENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

- Každý dávkovací přístroj, jenž vykazuje viditelná poškození nebo známky opotřebení, musí být vyměněn.
- Konec životnosti opakovaně použitelného dávkovacího přístroje je obvykle podmíněn jeho opotřebením a poškozeními vznikajícími v důsledku používání.
- Životnost dávkovacího přístroje je překročena, jsou-li při vizuální kontrole zjištěna nepřijatelná zhoršení stavu, jako je opotřebení, zabarvení, zvuky jako lupnutí apod.

POČÁTEČNÍ OŠETŘENÍ NA MÍSTĚ

- Aby nedošlo ke kontaminaci v důsledku přischnutí, doporučuje se provádět přípravu na opětovné použití nejpozději do 2 hodin po použití výrobku.
- Po použití udržujte dávkovací přístroj ve vlhkém stavu, aby na něm nepřischly nečistoty.
- Kontaminovaný dávkovací přístroj je třeba na místo čištění přepravovat v čisté a uzavřené kartónové krabici/nádobě, schopné zabránit šíření kontaminace.

RUČNÍ ČISTĚNÍ

- Všechny povrchy pístu čistěte po dobu 30 vteřin čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čisticím prostředkem s obsahem isopropylalkoholu (např. CaviWipes 17 %). Utěrku v případě potřeby vyměňte, jakmile dojde k jejímu znečištění.
- Odstraňte zbytky z pístu kartáčováním po dobu 30 vteřin kartáčem s měkkými štětinami nebo zubním kartáčkem. V případě potřeby prodlužte dobu provádění tohoto úkonu, dokud neodstraníte veškerá viditelná znečištění.
- Pro odstranění zbytků čisticího prostředku otřete všechny povrchy pístu dvakrát (2x) čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čistou vodou. V případě potřeby použijte další utěrky.
- Do meziprostorů v pístu provlečte čistou utěrku nepouštějící chlupy, navlhčenou čisticím prostředkem s obsahem isopropylalkoholu (např. CaviWipes 17 %) a za účelem vyčištění pístu ji v meziprostorech pohybujte tam a zpět po dobu 30 vteřin. Utěrku v případě potřeby vyměňte, jakmile dojde k jejímu znečištění.
- Odstraňte zbytky z meziprostorů pístu kartáčováním po dobu 30 vteřin kartáčem s měkkými štětinami nebo zubním kartáčkem. V případě potřeby prodlužte dobu provádění tohoto úkonu, dokud neodstraníte veškerá viditelná znečištění.
- Pro odstranění zbytků čisticího prostředku setřete všechny meziprostory pístu dvakrát (2x) čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čistou vodou. V případě potřeby použijte další čisté, navlhčené utěrky.
- Všechny povrchy dávkovacího přístroje čistěte po dobu 30 vteřin čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čisticím prostředkem s obsahem isopropylalkoholu (např. CaviWipes 17 %). Utěrku v případě potřeby vyměňte, jakmile dojde k jejímu znečištění.
- Odstraňte zbytky z drážek dávkovacího přístroje kartáčováním po dobu 140 vteřin kartáčem s měkkými štětinami nebo zubním kartáčkem. V případě potřeby prodlužte dobu provádění tohoto úkonu, dokud neodstraníte veškerá viditelná znečištění.
- Pro odstranění zbytků čisticího prostředku otřete všechny povrchy dávkovacího přístroje dvakrát (2x) čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čistou vodou. V případě potřeby použijte další utěrky.
- Do meziprostorů dávkovacího přístroje provlečte čistou utěrku nepouštějící chlupy, navlhčenou čisticím prostředkem s obsahem isopropylalkoholu (např. CaviWipes 17 %) a za účelem vyčištění meziprostorů ji pohybujte tam a zpět po dobu 30 vteřin. Utěrku v případě potřeby vyměňte, jakmile dojde k jejímu znečištění.
- Odstraňte zbytky z meziprostorů kartáčováním po dobu 30 vteřin kartáčem s měkkými štětinami nebo zubním kartáčkem. V případě potřeby prodlužte dobu provádění tohoto úkonu, dokud neodstraníte veškerá viditelná znečištění.
- Pro odstranění zbytků čisticího prostředku otřete všechny meziprostory dávkovacího přístroje dvakrát (2x) čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čistou vodou. V případě potřeby použijte další čisté, navlhčené utěrky.

RUČNÍ DEZINFEKCE

- Použijte čistou utěrku nepouštějící chlupy, navlhčenou dezinfekčním prostředkem s obsahem isopropylalkoholu (např. CaviWipes 17%) tak, aby všechny povrchy a mezery pístu a dávkovače zůstaly po dobu nejméně pěti (5) minut viditelně vlhké. Použijte další utěrky, abyste zajistili, že všechny povrchy a mezery zůstanou během kontaktní doby pěti (5) minut vlhké.
- Na odstranění zbývajících dezinfekčního prostředku použijte čistou utěrku nepouštějící chlupy, navlhčenou destilovanou nebo obdobně čistou vodou, s níž nejméně dvakrát (2x) otřete všechny povrchy a mezery pístu a dávkovače. V případě potřeby použijte další utěrky.

SUŠENÍ

Píst a dávkovací přístroj nechejte sušit, dokud nejsou viditelně suché.

ÚDRŽBA, PROHLÍDKA A KONTROLA

Prohlídka dávkovače a pístu při běžném osvětlení:

- Každý dávkovač nebo píst vykazující viditelná poškození nebo opotřebení, musí být vyměněn.
- Není-li dávkovač nebo píst viditelně čistý, je nutno ruční čištění a prohlídku opakovat.

ZABALENÍ

Dávkovací přístroj a píst opět složte dohromady.

STERILIZACE

Dávkovače představují nesterilní lékařské prostředky. Sterilizace není potřebná.

LIKVIDACE

Výrobek likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

Závažné nežádoucí příhody podle nařízení EU o zdravotnických prostředcích, k nimž dojde v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, musejí být hlášeny výrobcí a příslušnému úřadu.

ZÁRUKA

Společnost DS Dental Supply GmbH zaručuje, že tento výrobek nevykazuje žádné vady materiálu ani výrobní vady. Společnost DS Dental Supply GmbH nepřebírá žádnou další odpovědnost, ani jakoukoli implicitní záruku, co se týče prodejnosti nebo vhodnosti výrobku pro určitý účel. Za řádné použití výrobku v souladu s účelem, pro nějž je tento určen, odpovídá uživatel. Vyskytnou-li se v záruční době u výrobku vady, můžete požadovat výlučně opravu nebo výměnu příslušného výrobku společnosti DS Dental Supply GmbH, přičemž povinnost společnosti DS Dental Supply GmbH se rovněž omezuje pouze na provedení takové opravy resp. výměny.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V rozsahu, v němž zákon připouští vyloučení odpovědnosti, nenese společnost DS Dental Supply GmbH odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené tímto výrobkem, ať již se jedná o přímé, nepřímé, zvláštní, vedlejší nebo následné škody, a to bez ohledu na jejich právní základ, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti nebo úmyslu.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

POUZE PRO STOMATOLOGICKÉ POUŽITÍ!