



NÁVOD K POUŽITÍ

ABSORBENT PAPER POINTS

I. Popis:

Pearl Endopia Absorbent Paper Points obsahují absorpční papír, který se používá k vysušení kořenového kanálku před použitím Gutta Percha Points

II. Kontraindikace:

Nepoužívejte Paper Points u pacientů, kteří mohou být citliví na některou z jeho složek.

III. Opatření:

- Pouze pro dentální použití
- Nepoužívejte autokláv
- Po otevření obalu není zaručena sterilita

Pečlivě dodržujte doporučené podmínky skladování..

Udržujte Paper Points v suchu, aby se zabránilo růstu bakterií, které způsobí, že Paper Points nebudou použitelné.

Paper Points nelze čistit ani osobně sterilizovat. Může to způsobit, že se zařízení stane nepoužitelným.

IV. Varování:

- Ujistěte se, že kanálek je po použití Paper Points zcela vysušen. Pokud kanálek řádně nevysušíte, může to vést k citlivosti pacienta nebo ke zpoždění procedury.
- Během laterální kondenzace nevyvíjejte nadměrnou sílu, abyste předešli vertikálnímu zlomení kořene.
- Zajistěte správnou přípravu místa k odstranění infikované tkáně/kosti/dentinu, abyste zabránili infekci zaměřené na biomateriál.
- Dodržujte správné aseptické techniky, abyste zabránili kontaminaci.
- Dodržujte správné obturační techniky, abyste se vyhnuli procedurálním nehodám, které by mohly vést k perzistující infekci apikální periodontitidy.
- Po použití zajistěte odstranění Paper Point nebo vláken z kořenového kanálku. Pokud tak neučiníte, může dojít k postendodontickému periapikálnímu zánětu, bujné granulaci tkáně nebo periapikálním cystám.
- Nepoužívejte zdeformované nebo křehké Paper Point, protože by to mohlo mít za následek špatné vysychání kanálku nebo zpoždění procedury.
- Vždy zkontrolujte datum expirace produktu, abyste předešli procesním zpožděním nebo nepříjemnostem pro uživatele (např. rozbalení Paper Point).
- Pečlivě si přečtěte štítek na obalu, abyste zajistili použití příslušného Paper Point. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zpoždění v postupu



V. Indikace pro použití:

1. Vyberte absorbent Paper Point, který nejlépe odpovídá poslednímu nástroji použitému k tvarování kanálku.
2. Osušte kanál jemným vložením Paper Point na konečnou pracovní délku

VI. Symbol:

	Výroba / Legální výroba
	Kód šarže
	Datum spotřeby
	Zástupce EC
	Sterilizováno ozařováním
	CE marking Conformité Européene Notified Body Reference no. 1639

Draft	Review	Approval