

## **Návod na čištění a sterilizaci držáků rentgenových filmů a senzorů**

### **Čištění:**

1. Držáky musí být stočené do volné střední polohy (Super-Bite, Endo-Bite) nebo do otevřené polohy (Kwik-Bite Senso).
2. Z nástrojů a povrchu odstraňte vhodnou látkou (nebo kartáčkem) namočenou do teplé vody s mýdlem (nebo čistícím prostředkem) viditelné zbytky tkání resp. organického materiálu.
3. Zkontrolujte nástroje, zda na nich nejsou nečistoty. Najdete-li nějaké nečistoty, zopakujte 2.krok čištění.
4. Ihned ponořte do vhodného dezinfekčního roztoku pro umělohmotné nástroje a řiďte se instrukcemi od výrobce.
5. Místo bodu 4 je možné použít ultrazvukový čistič s odpovídajícím čistícím a dezinfekčním prostředkem podle návodu výrobce.
6. Opláchněte všechny části pod teplou vodou z vodovodu.
7. Nástroje osušte.
8. Jako alternativu k bodům 2 až 7 je možné využít termální dezinfekci při 93°C s pomocí vhodného čistícího prostředku v souladu s instrukcemi od výrobce.
9. Držáky stočte zpět do běžné uzamčené polohy (Super-Bite, Endo-Bite).

### **Sterilizace:**

1. Držáky musí být stočené do volné střední polohy.
2. Sterilizujte v parním autoklávu s destilovanou vodou při 134°C (273°F) po dobu 3 minut.
3. Nepoužívejte chemický autokláv či studené sterilizační roztoky.
4. Zabraňte přímému kontaktu s kovovou částí autoklávu.
5. Držáky stočte zpět do normální polohy (Super-Bite, Endo-Bite).