


endo★star PASTE FILLERS WITH SAFETY SPRING (PFL)

1. Popis:

Plniče kořenových kanálků Endostar s bezpečnostní pružinou (nazývané také Lentulo spirály, spirálové plniče nebo nosiče pasty) se používají k zavádění pastovitých materiálů, cementů a sealerů do kořenových kanálků. Pracovní část má kónický tvar a skládá se z volně vinuté spirály z tenkého drátu. Plniče kořenových kanálků s bezpečnostní pružinou mají na kovové rukojeti dodatečnou, těsně vinutou pružinu pro lepší flexibilitu a ochranu před zlomením během rotačních pohybů v kanálku.

- Aplikace materiálů se provádí pohybem ve směru hodinových ručiček.
- Rychlost otáček: 250–800 ot./min (rpm).
- Příčný průřez: 

2. Doporučený počet použití:

Dvakrát, za předpokladu, že vizuální kontrola provedená zubním lékařem před použitím ukáže, že nástroj zůstává nepoškozený, není ohnutý (neplatí pro předhýbání nástroje lékařem podle zakřivení kanálku), není deformovaný a nevykazuje žádné známky opotřebení bříty (pracovní části).
Prodlužování životnosti nástroje nad rámec doporučení může mít za následek zlomení bříty.

3. Čištění a dezinfekce:

Podrobné pokyny k čištění a dezinfekci naleznete na adresách www.poldent.pl a www.endostar.eu.

4. Sterilizace:

Nesterilní prostředky. Před prvním použitím a po každém použití musí být vyčištěny, vydezinfikováni a vysterilizováni v souladu s pokyny dostupnými na webových stránkách www.poldent.pl a www.endostar.eu v záložce „Download“ (Ke stažení).

Nástroje lze dezinfikovat za použití jemných dezinfekčních prostředků, čistit v ultrazvukových čističkách a opakovaně sterilizovat v parním autoklávu v rozmezí níže uvedených parametrů: Teplota sterilizace 134°C, doba sterilizace 3 min, doba sušení 16 min.

5. Skladování:








Nástroje by měly být skladovány při pokojové teplotě v suchém, bezprašném a čistém prostředí.

6. Varování:

Pouze pro stomatologické použití

7. Reklamacce a stížnosti na produkt:

Informujte prosím distributora a výrobce o jakýchkoli reklamacích nebo nežádoucích příhodách, ke kterým došlo v důsledku používání tohoto prostředku. Každý závažný incident spojený s tímto produktem musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel usazen.

	Příčný průřez (tvar průřezu nástroje)
	Označení CE a identifikační číslo oznámeného subjektu
	Sterilizujte v parním autoklávu při teplotě 134 °C
	Nesterilní produkt
	Určeno k opracování (přípravě) kořenových kanálků.
	Sériové číslo / Číslo šarže
	Čtěte návod k použití (Viz návod k použití)
	Zdravotnický prostředek
	Katalogové číslo
	Jednotka balení (Obsah balení)
	Datum výroby
	Nerezová ocel



Výrobce:

Poldent Co. Ltd.

Dzika 2 Street

00-194 Warsaw, POLAND

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, www.endostar.eu, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Tato příručka byla naposledy aktualizována: 24.06.2026