

Mazání

Pracovní postup

LUBRIFLUID

Lubrifiant - mazací sprej 500ml
6 balení v kartonu
Objednávací číslo 1600064-006



Lubrimed - Náhradní
náplň lékařské vazeliny
6 ks náhradních náplní
v balení

Objednávací číslo
1600037-006

Lubrimed - Mazací
adaptér
Objednávací číslo
1000003-001



Pro turbinky s kuličkovými ložisky, všechny násadce
a bezuhlíkové mikromotory.

Basch a MX mikromotory




Turbinky a násadce



1 sek. ↓

1 sek. ↓

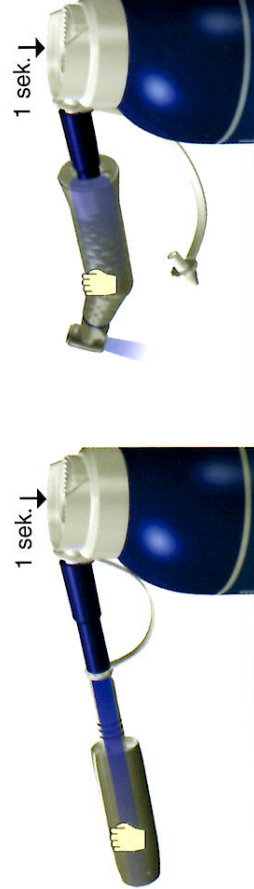

Další informace naleznete v provozním manuálu
vašeho zařízení.

Sterilizace

Nesterilizovatelné koncovky
Uhlíkové mikromotory řady MC3 ,
Aquilon vzduchový mikromotor,
Rychlospojky Unifix

Parní autoklávy do 136°C (277°F)



Parní autoklávy do 136°C (277°F)

Odstranění přebytku mazacího prostředku



Po čištění, dezinfekci / sterilizaci koncovek
a před jejich použitím