

Spraynet REF 1600036

Výhradně pro čištění

Výrobek je v souladu s aktuálními farmaceutickými a potravinářskými předpisy.

Vnější čištění hadříkem: nástroje,
elektrické motory, hadice.



Vnitřní čištění: turbíny, násadce,
kolínkové nástavce, rychlospojky.



Přímé vnější čištění: turbíny,
násadce, kolínkové nástavce,
rychlospojky



Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50 ° C. Nádobu nepropichujte a nespalujte, ani po spotřebování. Nestříkejte otevřeného ohně nebo na hořlavé předměty nebo osoby. Držte nádobu stranou od zdrojů zapálení, cigaretového kouře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádobu uchovávejte na dobře větraném místě. Nevdechujte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Bien-Air dental sa
Länggasse 60
CH-2504 bienne
Phone +41 32 344 64 64

