


MIRATORCH® II



Ø x L	40 x 155 mm
Teplota	800 °C - 1300 °C
Teplota (pájecí hrot)	200-450 °C
Náplň	Butan 10 g
Doba hoření	50 min

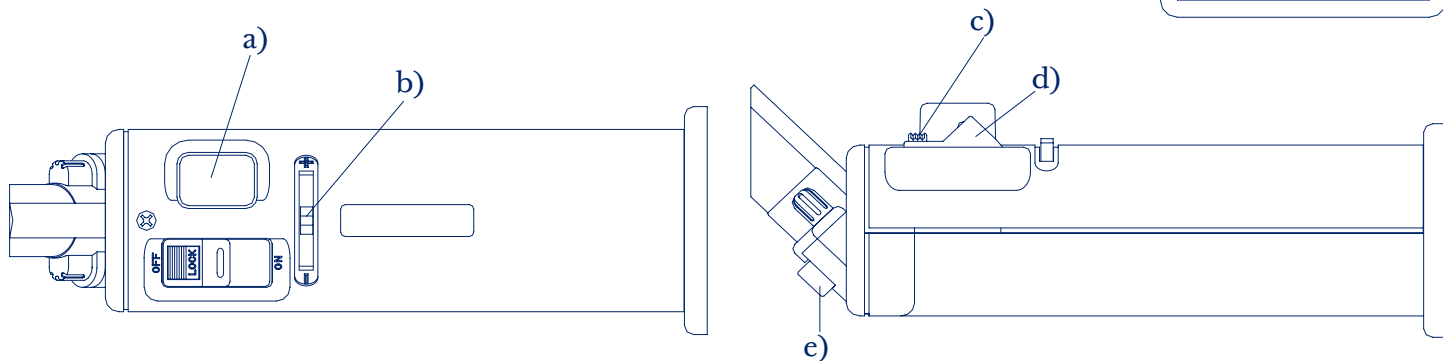

Návod k použití



- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| a) Zážehové tlačítko | d) Přepínač přívodu plynu |
| b) Regulátor intenzity plynu | e) Nastavení vzduchu |
| c) Bezpečnostní zámek | f) Přívod plynu |

UPOZORNĚNÍ:

- V dobře osvětleném prostoru se může plamen jevit menší, než ve skutečnosti je. Vyzařované teplo je velmi intenzivní a je citelné i na značnou vzdálenost od plamene, proto dbejte opatrnosti.
- Trysky udržujte čisté. S přístrojem zacházejte opatrně, zamezte pádu a nárazům.
- V průběhu použití se hořák silně zahřívá, proto se hořáku (obvzlášť trysky) nedotýkejte.
- Zařízení skladujte při teplotě do 40°C, mimo dosah slunečního záření. Zamezte vystavení ohni. Udržujte mimo dosah dětí.
- Plamenem nikdy nemiřte na sebe nebo na jinou osobu.

ZÁŽEH:


1. Posuňte bezpečnostní zámek pro uvolnění.
2. Stiskněte přepínač přívodu plynu.
3. Stiskněte tlačítko zážehu.

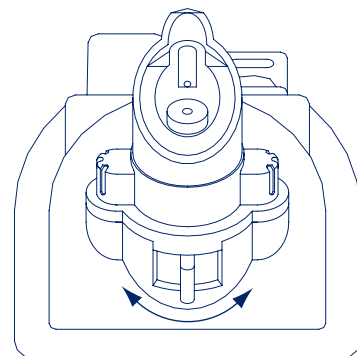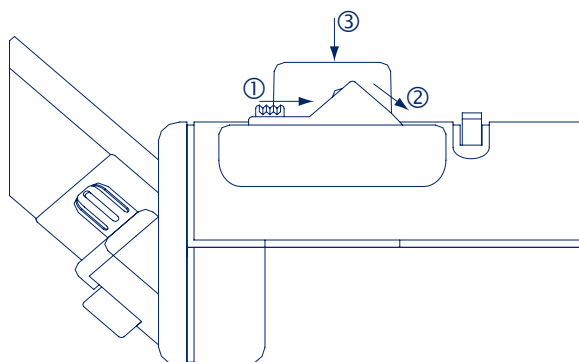

Pro zapálení musí být hořák nastaven na modrý plamen.



VYPNUTÍ:

4. Pro vypnutí posuňte přepínač přívodu plynu do polohy „OFF”.
5. Posuňte bezpečnostní zámek do uzamčené polohy.

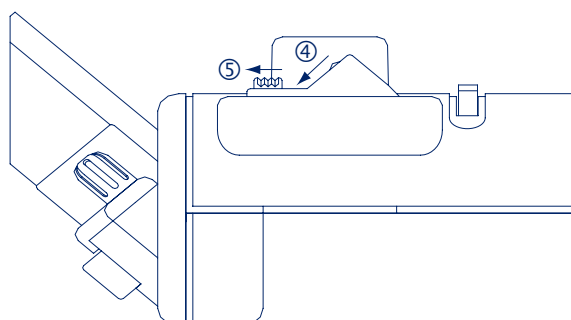

PLNĚNÍ:

- Nádobkou s plynovou náplní několikrát zatřeste. Ve vertikální poloze ji vzhůru nohama připojte k plnicí zástrčce.
- Když plyn začne unikat, ukončete plnění.
- Při plnění se vyvarujte styku s ohněm a ujistěte se, že místnost je dobře větraná. Butan je těžší než vzduch a má tendenci zůstat u podlahy místnosti. Hořák nezapalujte ihned po doplnění.
- Při plnění se nedotýkejte zážehového tlačítka.

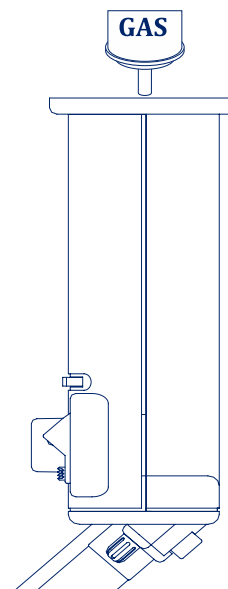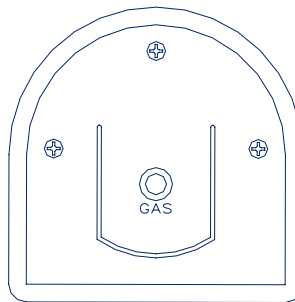

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

	Příčina	Řešení
Plamen je malý	Nízká okolní teplota.	Přesuňte se na teplejší místo.
	Válec je studený (po nepřetržitém použití).	Zahřejte válec dlaněmi nebo jej chvíli nepoužívejte, dokud se neohřeje.
	Došel plyn.	Doplňte zásobník plynu.
Nedochází k zážehu	Znečištěná tryska.	Odstraňte z trysky veškeré nečistoty.
	Volič intenzity plamene je uzamčen v pozici (-).	Posuňte volič intenzity plamene blíže k pozici (+).