

Návod k použití:

GC Fujirock EP

Návod:

1. Smíchejte prášek s tekutinou v poměru 100g prášku / 20ml destilované vody
2. Čas pro ruční míchání: 15 sekund
Čas pro strojové míchání: 45 sekund
3. Namíchanou hmotu nalijte na model, který jemně vibruje
4. Čas sejmutí otisku ze lžice:

hydrokoloid	30 minut
algináty	30 minut
polysulfidy	40 minut
vinylpolysiloxany	40 minut

Poznámky:

1. Skladujte v pevně uzavřeném boxu v chladné a suché místnosti. Modelovací sádky jsou nepoužitelné, pokud jsou volně vystaveny vzduchu, zvláště při vysoké vlhkosti.
2. Kvůli zachování optimálních fyzikálních vlastností používejte pro smíchání s práškem destilovanou vodu.
3. Nevdechovat sádrový prach.
4. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchnout čistou vodou.
5. Během opracování modelu používejte ochranu očí.

Vystaveno 3/2015

GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode – Lueven 1240
Interleuven Laan 33, B – 3001 Leuven
Belgium