

VYLOŽENÍ LICÍHO KROUŽKU (CASTING RING LINER)

je suchá vložka do licích kroužků na bázi biologicky rozložitelných vláken z vápenato-hořečnato-křemičitých sloučenin, speciálně navržena pro fosfátově vázané formovací hmoty.

VLASTNOSTI

- Optimální tlumení vždy napomáhá k dosažení přesných odlitků.
- Pomáhá eliminovat praskliny ve formovací hmotě díky lepší tepelné odolnosti při vypalování.
- Snadná aplikace do licích kroužků díky optimální flexibilitě.
- Vysoká odolnost proti roztržení.
- Dobrá pružnost.
- Hladké povrchy na obou stranách.
- Velmi nízká tepelná vodivost.
- Odolnost vůči teplotním šokům.
- Biologicky rozložitelná.

POUŽITÍ

1. Řiďte se tabulkou níže. Odřízněte vložku tak, aby mezi voskovým (nebo pryskyřičným) modelem a povrchem vložky zůstalo více než 5 mm volného prostoru.

Velikost kroužku	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Doporučený počet vrstev v kroužku
1x	1,0	55	1x
3x	1,0	55	1x
6x	2,0	55	2x
9x	2,0	55	2x

DISTRIBUTED by GC EUROPE N.V.

Research Park Haasrode-Leuven 1240,

Interleuvenlaan 33, B-3001,

Belgium